

サータの洗浄方法について



ステップ1

中性洗剤を入れた溶液を用意し、目で見て汚れがなくなるまでサータをすすぎ、10分以上浸した後、自然乾燥する。

ステップ2

次亜塩素酸ナトリウム0.6%溶液を用意し、60分浸した後、常温の水道水にてしっかりすすぎ、自然乾燥する。

健感発第0130001号『感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き』参照

<注意>

- 血液で汚染された可能性のあるエンライトサータは再使用せず、医療廃棄物として廃棄してください。
- 血液感染性ウイルスの抗体検査などによってウイルス感染が疑われる患者様にエンライトサータを使用する場合は、個人使用としてください。

**複数患者での使用を目的としているため、
洗浄と消毒の徹底をお願いいたします**